


# Clean

Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista för Clean. Tvätt- och rengöringsinstruktioner av produkten återfinns på produkten alternativt i produktkatalogen. Vid rengöring av chassit i diskabinett skall produkten stå fixerad och placeras upprätt med låsta hjul. Kontrollera och justera enligt följande:

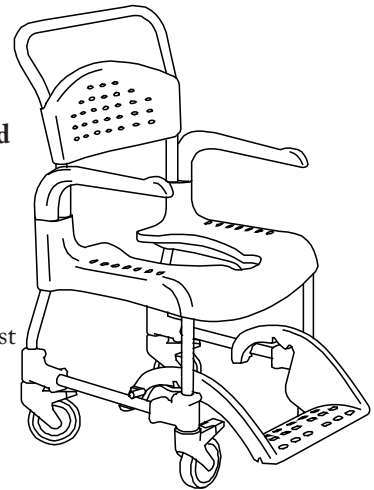

1) **Att skruv/mutter till länkhjulen är ordentligt åtdragna (6Nm).**

Om hjulen sitter löst eller skall bytas p.g.a. slitage:

- Skruva loss skruv/mutter helt och dra hjulet nedåt .
- Vid återmontering, se till att skruven går igenom hålet i hjultappen, skruva fast skruv/mutter (momentnyckel: 6Nm ).

Verktyg: Torxnyckel T30

2) **Att hjulen fungerar på avsett vis.**

- Att låsfunktionen fungerar
- Att hjulen låser tillfredsställande. Hjulen skall inte kunna rulla i låst läge.
- Att stolen rullar tillfredsställande.

3) **Att produkten är hopsatt på ett riktigt sätt.**

- Att produkten och eventuella tillbehör är monterade på ett riktigt sätt enligt monteringsanvisning
- Att alla skruvar är åtdragna.

Verktyg: Torxnyckel T30

4) **Att löstagbara detaljer är i dugligt skick och är Etacs originalprodukter.**

- Att armstöden går att ta av.
- Att armstöden går att låsa i användarläge.
- Att fotplattan kan skjutas in under stolen.

5) **Att armstödsfästena är hela.**

Belasta armstöden med handkraft på olika sätt för att se om armstöd och fästena är hela. Gör sedan en funktionskontroll.

## Tillägg för Clean 24"

6) **Att drivhjulsmonteringen inte glappar.**

Om hjulen sitter löst eller skall bytas p.g.a. slitage:

- Skruva loss hjulet helt och rengör gängan med en trasa vid behov.
- Originalbult är behandlad med s. k Tufloc (låsvätska) som ska klara 1-2 ommonteringar. Kontrollera tufloc-kvaliteten och vid behov droppa låsvätska (motsvarande loctite 243 eller likvärdigt) enligt tillverkarens instruktioner på gängan och skruva fast hjulet.
- Drivhjulen är riktigt monterade när båda snurrarlika lätt utan glapp i monteringen.

Verktyg: 2 st 19 mm hylsnyckel

7) **Att bromsarna till drivhjulen är i dugligt skick.**

Bromstappen ska i obromsat läge befinna sig mellan 18-22mm från däckets.

När bromsen är tillslagen skall stolen inte kunna rullas baklänges vid en belastning av 15 kg på plan mark.

8) **Att drivhjulsadaptorna är ordentligt monterade.**

Verktyg: 6m sexkantsnyckel

Vit förbättringsfärg finns att köpa från Etac för att bättra på små lackskador. Art nr 84005052

78225D

2012-09-04

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com