

Bima sittdyna plan

Målgrupp

Komforthöjande sittdyna avsedd för brukare som sitter kortare stunder i rullstol t.ex. vid transporter. Brukaren kan självständigt göra lägesförändringar och har inte några speciella sittproblem.

Kombinationer

Sittdynan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar. Kan även användas i andra sittmöbler. Sittdynan kan användas med, på marknaden vanligen förekommande utjämningskivor för att få en jämn sittyta i rullstolar med hängmattesits.

Handhavande

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur dynan ska placeras.

Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan. Den räfflade antiglidytan ska vara neråt.

Den vita etiketten med placeringspilarna visar hur dynan ska vändas.

Sittytan är monterad med motsatt luggriktning. Det förhindrar brukaren att glida framåt och samtidigt underlättar det sidoförflyttningar och förflyttning bakåt. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på dynbasen stämmer med märkningen på överdraget. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

Vid inkontinens används en skyddshätta som finns som tillbehör.

Rengöring och skötsel

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning i 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp). Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling alternativt dropptorkas i torkskåp.

Vid inkontinens används en skyddshätta (tillbehör) som gör det enkelt och smidigt vid tvätt. Dessutom ”sätter sig” inte urindoft i dynan.

Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod

Artikelnummer, mått och brukarvikter finns på baksidan.

Vikt 45x40x7cm 1,3 kg.

ISO-kod: 181006 Sittdyna för korttidssittande

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Extra överdrag

För att beställa ett extra överdrag, ange Ö före artikelnumret. T.ex. Ö05-4545-P

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI.

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Art.nr, mått och brukarvikt

Bima sittdyna med plan botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt										
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	05-3535-P	05-3538-P	05-3540-P	05-3543-P	05-3545-P				7	125
37,5	05-3735-P	05-3738-P	05-3740-P	05-3743-P	05-3745-P	05-3747-P	05-3750-P		7	125
40	05-4035-P	05-4038-P	05-4040-P	05-4043-P	05-4045-P	05-4047-P	05-4050-P		7	125
42,5		05-4238-P	05-4240-P	05-4243-P	05-4245-P	05-4247-P	05-4250-P		7	125
45		05-4538-P	05-4540-P	05-4543-P	05-4545-P	05-4547-P	05-4550-P		7	125
47,5		05-4738-P	05-4740-P	05-4743-P	05-4745-P	05-4747-P	05-4750-P		7	125
50		05-5038-P	05-5050-P	05-5043-P	05-5045-P	05-5047-P	05-5050-P		7	125
52,5			05-5240-P	05-5243-P	05-5345-P	05-5247-P	05-5250-P		7	150
55			05-5540-P	05-5543-P	05-5545-P	05-5547-P	05-5550-P	05-5555-P	7	150
57,5			05-5740-P	05-5743-P	05-5745-P	05-5747-P	05-5750-P	05-5755-P	7	150
60					05-6045-P	05-6047-P	05-6050-P	05-6055-P	7	150

Art.nr, storlek, brukarvikt anpassade för barn

Bima sittdyna med plan botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt										
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	22/24	25/27	27/29	30/32	32/34	35/37	38/40	40/42		
20	C05-2022-P	C05-2025-P	C05-2027-P						3	50
22	C05-2222-P	C05-2225-P	C05-2227-P						3	50
24		C05-2425-P	C05-2427-P	C05-2430-P					3	50
26		C05-2625-P	C05-2627-P	C05-2630-P	C05-2632-P				3	60
28		C05-2825-P	C05-2827-P	C05-2830-P	C05-2832-P	C05-2835-P			3	60
30			C05-3027-P	C05-3030-P	C05-3032-P	C05-3035-P	C05-3038-P		3	70
32				C05-3230-P	C05-3232-P	C05-3235-P	C05-3238-P	C05-3240-P	3	70
35					C05-3532-P	C05-3535-P	C05-3538-P	C05-3540-P	3	70

Bima sittdyna med kupad botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt										
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	22/24	25/27	27/29	30/32	32/34	35/37	38/40	40/42		
20	C05-2022-K	C05-2025-K	C05-2027-K						5	50
22	C05-2222-K	C05-2225-K	C05-2227-K						5	50
24		C05-2425-K	C05-2427-K	C05-2430-K					5	50
26		C05-2625-K	C05-2627-K	C05-2630-K	C05-2632-K				5	60
28		C05-2825-K	C05-2827-K	C05-2830-K	C05-2832-K	C05-2835-K			5	60
30			C05-3027-K	C05-3030-K	C05-3032-K	C05-3035-K	C05-3038-K		5	70
32				C05-3230-K	C05-3232-K	C05-3235-K	C05-3238-K	C05-3240-K	5	70
35					C05-3532-K	C05-3535-K	C05-3538-K	C05-3540-K	5	70