

## TOAFÖRHÖJNING BARN

Artikelnummer: 144975

**Avsedd användning:** Toaförhöjning Barn är avsedd att öka sitthöjden för att underlätta vid toalettbesök. Helsevetsad konstruktion belagd med en vit slitstark pulverlack. Sitsen är tillverkad i plast (PP) vilket ger en värmeisolerande yta. Stödfötterna är tillverkade i TPE, en mjuk plast som ej ger ifrån sig märken på plastgolv. Höjdinställningen sker med clips. Löstagbar potta med handtag ingår.




### Teknisk specifikation

Sittring:	Djup 28,5 cm x Bredd 25 cm
Hål sittring:	Djup 19,5 cm x Bredd 16,5 cm
Ställbar höjd:	34,5-44,5 cm
Höjd armstöd från sits:	18 cm
Bredd mellan armstöd:	32,5 cm Ytermått 37,5 cm
Vikt:	3,6 kg
Max brukarvikt:	70 kg

**Material:** Stål, PP (sits), TPE (stödfötter)

### ⚠ Säkerhetsanvisningar:

- Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Toalettlocket får ej användas som ryggstöd. Se bild A
- Stolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen får ej vinklas upp i sådant läge att stolen endast står på två ben då brukaren sitter i stolen. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Stödfötterna skall kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Innan användning säkerställ att clipset för höjdjustering sitter ordentligt intryckt.
- Vid byte av clips säkerställ att det är rätt modell (olika storlekar finns)
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.
- Max brukarvikt 70 kg.

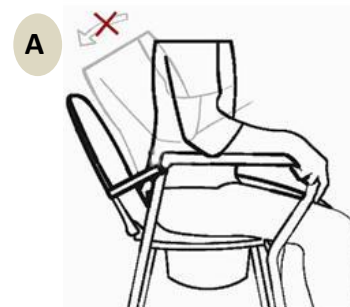

Tillverkad av:

**Swereco Rehab AB**

Barnhusgatan 4

SE-111 23 Stockholm

Tel: +46 8 444 38 20

Fax: +46 8 754 30 80

www.swereco.se

info@swereco.se

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.

**Max 70 kg**



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.






Visuell kontroll



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

## Användning:

1. Montera potta så som bilden visar.
2. Toalettlocket får ej användas som ryggestöd.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

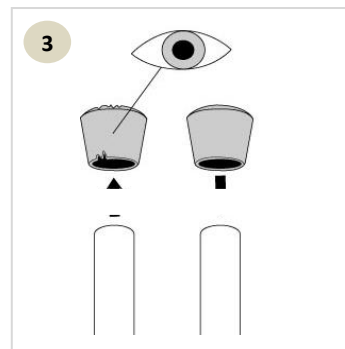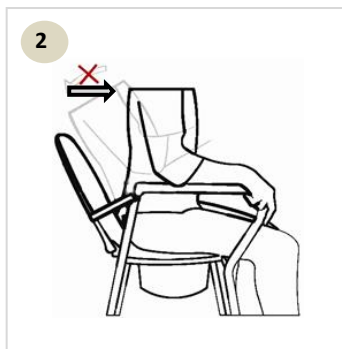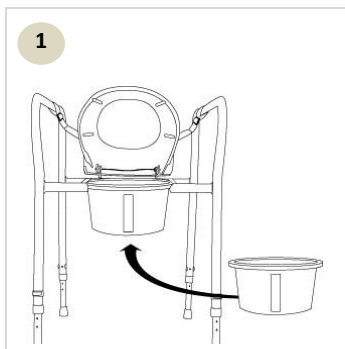

**Skötselansvisningar:** Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/vecka) med tvällösning, pH 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70 % isopropanol.

## Reservdelar:

Art. Nr 120695, Stödfot  
Art. Nr 14497508, Toasits  
Art. Nr 14497115, Potta

[www.swereco.se](http://www.swereco.se)  
[info@swereco.se](mailto:info@swereco.se)