

# Bima conform

---

## Målgrupp

Stabil, komfortabel och tryckavlastande rullstolsdyna. Avsedd för personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt sittande. Dynan avlastar sittbenen och svanskotan, används vid längre tids sittande. Bima conform är förebyggande mot sår. Den används när det finns medel - låg risk för trycksår.

## Kombinationer

Sittdynan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar. Kan även användas i andra sittmöbler. Bima conform plan kan användas med, på marknaden vanligen förekommande utjämningskivor för att få en jämn sittyta i rullstolar med hängmattesits. Sittdynan finns med plan eller kupad botten. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämnning.

## Handhavande

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur dynan ska placeras. Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan. Den vita etiketten med placeringspilarna visar hur dynan ska vändas. Handtaget ska vara framåt. Den räfflade antiglidyten ska vara vänd neråt.

Dynan behöver inte ställas in eller behöver något annat underhåll mer än rengöring.

Sittytan är monterad med motsatt luggriktning. Det förhindrar brukaren att glida framåt och samtidigt underlättar det sidoförflyttningar och förflyttning bakåt.

Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på dynbasen stämmer med märkningen på överdraget. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

## Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod

Artikelnummer, mått och brukarvikter finns på baksidan. För att beställa extra överdrag ange **Ö+** artikelnummer t.ex. **Ö54-4440-K**. För att beställa en inkontinenshätta ange **INKO+** artikelnummer t.ex. **INKO54-4440-K**

Vikt: Bima conform 44x40x7cm plan 1,2 kg.

ISO-kod: 04 33 03 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

## Rengöring och skötsel

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning i 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp). Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling alternativt dropptorkas i torkskåp.

Vid inkontinens används en skyddshätta (tillbehör) som gör det enkelt och smidigt vid tvätt. Dessutom ”sätter sig” inte urindoft i dynan.

## Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO 8191-1 och ISO 8191-2 (ISO 7176-16)

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: [info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se).

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI.

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

### Bima conform med **plan** botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt

(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup> där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
36	54-3635-P	54-3638-P	54-3640-P	54-3643-P					7	125
38	54-3835-P	54-3838-P	54-3840-P	54-3843-P	54-3845-P	54-3847-P	54-3850-P		7	125
40	54-4035-P	54-4038-P	54-4040-P	54-4043-P	54-4045-P	54-4047-P	54-4050-P		7	125
42		54-4238-P	54-4240-P	54-4243-P	54-4245-P	54-4247-P	54-4250-P		7	125
44		54-4438-P	54-4440-P	54-4443-P	54-4445-P	54-4447-P	54-4450-P		7	125
46		54-4638-P	54-4640-P	54-4643-P	54-4645-P	54-4647-P	54-4650-P		7	125
48		54-4838-P	54-4840-P	54-4843-P	54-4845-P	54-4847-P	54-4850-P		7	125
50		54-5038-P	54-5040-P	54-5043-P	54-5045-P	54-5047-P	54-5050-P		7	150
52			54-5240-P	54-5243-P	54-5245-P	54-5247-P	54-5250-P	54-5255-P	7	150
54			54-5440-P	54-5443-P	54-5445-P	54-5447-P	54-5450-P	54-5455-P	7	150
56			54-5640-P	54-5643-P	54-5645-P	54-5647-P	54-5650-P	54-5655-P	7	150
58				54-5843-P	54-5845-P	54-5847-P	54-5850-P	54-5855-P	7	150
60					54-6045-P	54-6047-P	54-6050-P	54-6055-P	7	150

### Bima conform med **kupad** botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt

(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup> där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
36	54-3635-K	54-3638-K	54-3640-K	54-3643-K					8	125
38	54-3835-K	54-3838-K	54-3840-K	54-3843-K	54-3845-K	54-3847-K	54-3850-K		8	125
40	54-4035-K	54-4038-K	54-4040-K	54-4043-K	54-4045-K	54-4047-K	54-4050-K		8	125
42		54-4238-K	54-4240-K	54-4243-K	54-4245-K	54-4247-K	54-4250-K		8	125
44		54-4438-K	54-4440-K	54-4443-K	54-4445-K	54-4447-K	54-4450-K		8	125
46		54-4638-K	54-4640-K	54-4643-K	54-4645-K	54-4647-K	54-4650-K		8	125
48		54-4838-K	54-4840-K	54-4843-K	54-4845-K	54-4847-K	54-4850-K		8	125
50		54-5038-K	54-5040-K	54-5043-K	54-5045-K	54-5047-K	54-5050-K		8	150
52			54-5240-K	54-5243-K	54-5245-K	54-5247-K	54-5250-K	54-5255-K	8	150
54			54-5440-K	54-5443-K	54-5445-K	54-5447-K	54-5450-K	54-5455-K	8	150
56			54-5640-K	54-5643-K	54-5645-K	54-5647-K	54-5650-K	54-5655-K	8	150
58				54-5843-K	54-5845-K	54-5847-K	54-5850-K	54-5855-K	8	150
60					54-6045-K	54-6047-K	54-6050-K	54-6055-K	8	150

### Bima conform barn med **plan** botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt

(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup> där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	22/24	25/27	27/29	30/32	32/34	35/37	38/40	40/42		
20	C54-2022-P	C54-2025-P	C54-2027-P						5	40
22	C54-2222-P	C54-2225-P	C54-2227-P						5	45
24		C54-2425-P	C54-2427-P	C54-2430-P					5	50
26		C54-2625-P	C54-2627-P	C54-2630-P	C54-2632-P				5	55
28		C54-2825-P	C54-2827-P	C54-2830-P	C54-2832-P	C54-2835-P			5	60
30			C54-3027-P	C54-3030-P	C54-3032-P	C54-3035-P	C54-3038-P		5	65
32				C54-3230-P	C54-3232-P	C54-3235-P	C54-3238-P	C54-3240-P	5	70
35					C54-3532-P	C54-3535-P	C54-3538-P	C54-3540-P	5	70

### Bima conform barn med **kupad** botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt

(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup> där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	22/24	25/27	27/29	30/32	32/34	35/37	38/40	40/42		
20	C54-2022-K	C54-2025-K	C54-2027-K						6	40
22	C54-2222-K	C54-2225-K	C54-2227-K						6	45
24		C54-2425-K	C54-2427-K	C54-2430-K					6	50
26		C54-2625-K	C54-2627-K	C54-2630-K	C54-2632-K				6	55
28		C54-2825-K	C54-2827-K	C54-2830-K	C54-2832-K	C54-2835-K			6	60
30			C54-3027-K	C54-3030-K	C54-3032-K	C54-3035-K	C54-3038-K		6	65
32				C54-3230-K	C54-3232-K	C54-3235-K	C54-3238-K	C54-3240-K	6	70
35					C54-3532-K	C54-3535-K	C54-3538-K	C54-3540-K	6	70